


OTC - ACTIVE

MANUAL DE INSTRUCCIONES



E	Diagrama OTC - ACTIVE.....	1
	Encendido y apagado.....	2
C	Cómo se utilizan.....	3
	Ajuste de volumen.....	4
	Selección de modos.....	5
I	Cómo se carga el audífono OTC - ACTIVE.....	6/7
	Conexión bluetooth.....	8/9
D	Llamadas.....	10
	Parámetros técnicos.....	11/12
	Solución de problemas.....	13
N	Cómo se carga el audífono OTC y el cargador.....	11
	Solucionar problemas de carga.....	12
I	Declaración de advertencia de la FCC.....	13/17

DIAGRÁMA OTC - ACTIVE

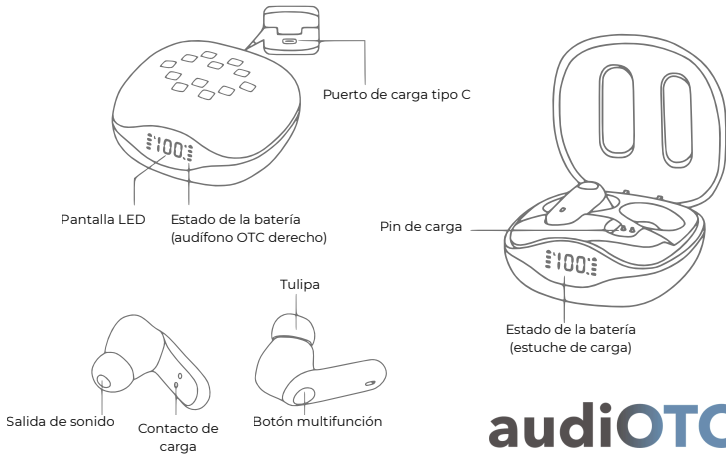


audiOTC

ENCENDIDO / APAGADO


ENCENDIDO

El audífono OTC - ACTIVE se encenderá automáticamente cuando se saque del estuche de carga

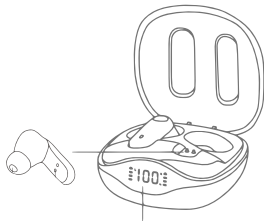


APAGADO

El audífono OTC - ACTIVE se apagará automáticamente cuando se introduzca en el estuche de carga

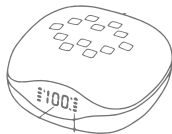

CÓMO SE UTILIZAN

1

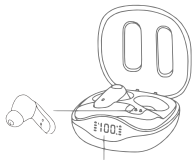


Abra el estuche de carga y extraiga los audífonos OTC - ACTIVE

2




Seleccione un tamaño de tulipa que se ajuste a su canal auditivo

3

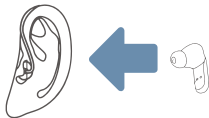


Inserte OTC - ACTIVE en sus oídos y gírelo hasta que esté situado firmemente en el canal auditivo

4

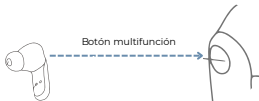

Ajuste los botones multifunción hasta que el volumen sea el apropiado

AJUSTE DE VOLUMEN

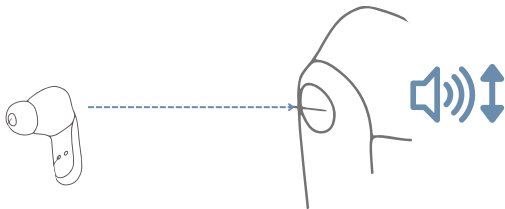

Presione brevemente el botón multifuncional para realizar ciclos y aumentar el volumen del audífono. El modo de ciclo de volumen del audífono es el siguiente:

1-2-3-4-4-5-6-5-5-4-3-2-1

Con un volumen total de 6 niveles y un volumen predeterminado de 4 niveles al inicio

SELECCIÓN DE MODOS



MODO AUDÍFONO OTC



MODO BLUETOOTH

Modo audífono OTC

El modo predeterminado al encender los OTC - ACTIVE es el modo audífono OTC.

Modo audífono OTC

En el modo de audífono OTC, si hay una llamada telefónica o música de su dispositivo bluetooth emparejado, los audífonos cambiarán automáticamente al modo bluetooth, lo que le permitirá contestar/rechazar/colgar llamadas telefónicas y escuchar música..

La función de audífono no funcionará en modo Bluetooth cuando haya audio Bluetooth

CÓMO SE CARGA EL AUDÍFONO OTC - ACTIVE

Cuando se abre el estuche de carga la pantalla de visualización se ilumina y se apaga después de 10 segundos.



El estuche carga los OTC - ACTIVE y la luz indicadora correspondiente en el costado se ilumina gradual y cíclicamente. Se apaga después de 10 segundos



Cuando el audífono OTC - ACTIVE se ajusta correctamente al pin de carga, la luz indicadora correspondiente se enciende durante 10 segundos y luego se apaga.

Batería baja


Cuando los OTC - ACTIVE tengan poca batería, reproducirán un mensaje de voz para recordarle que los cargue.




Cuando sus audífonos OTC - ACTIVE se queden completamente sin batería, se apagarán. Se recomienda volver a colocar los dispositivos en el estuche de carga para cargarlos lo antes posible después de escuchar el mensaje de voz.




CONEXIÓN BLUETOOTH

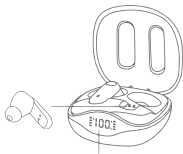

- 1 Saque los audífonos OTC - ACTIVE del estuche de carga.

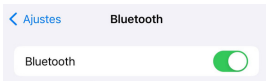


- 2 Encienda el Bluetooth de su teléfono.

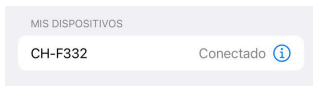


- 3 Pulse el nombre del audífono OTC - ACTIVE (CH-F332) cuando aparezca en la pantalla de su teléfono para vincularlo.

Desconexión de Bluetooth

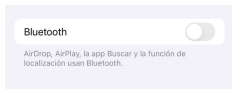

- 1 Apague el bluetooth de su teléfono y los audífonos OTC - ACTIVE se desvincularán.

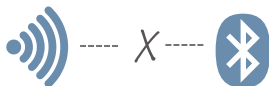

- 2 Cuando los dispositivos estén fuera del alcance Bluetooth de su móvil, se desvincularán.

***Tras vincular el bluetooth de su teléfono, los OTC - ACTIVE siempre estarán conectados, incluso en el modo audífono OTC.*

LLAMADAS



Responder una llamada entrante

Presione el botón multifunción para responder una llamada entrante.



Rechazar una llamada entrante

Mantenga presionado el botón multifunción durante 2 segundos para rechazar llamadas entrantes.



Rechazar una llamada entrante

Mantenga presionado el botón multifunción durante 2 segundos para rechazar llamadas entrantes.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Duración de la batería (Audífono OTC)	Duración de la batería (con estuche de carga)	Tiempo de carga (audífono OTC)	Peso
10 Horas	40 Horas	1-2 Horas	35 g
Consumo de energía apagado	Voltaje de funcionamiento	Capacidad de la batería (audífono OTC)	Capacidad de la batería (estuche de carga)
<10uA	CC 3,7 V (batería de litio)	40 mAh	500 mAh

PARÁMETROS TÉCNICOS

Pico de salida máxima Peak OSPL 90(dB SPL) ≤118 dB ±3 dB	Salida promedio HAF OSPL 90(dB SPL) 114 dB ±2 dB	Ruido de entrada equivalente Equivalent input Noise (dB) ≤22dB + 3dB	Ganancia máxima Peak gain (dB) 35 dB ±5 dB
Ganancia promedio HAF/FOG Gain (dB) 34 dB ±4 dB	Rango de frecuencia Frequency range 300 Hz ~ 5000 Hz.	Distorsión Distortion ≤4%	Tamaño Overhall dimensión 60x60x32 mm

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El sonido está distorsionado	Baje el volumen	Cargue el audífono OTC	Limpie la tulipa
El sonido es débil	Cargue el audífono OTC	Suba el volumen	Compruebe si la tulipa esta obstruida
Suena un pitido constante	Inserte las tulipas hasta que encajen	Baje el volumen	Limpie las tulipas
Los audífonos OTC no funcionan	Limpie el receptor	Remplace por otra tulipa	Cargue el audífono OTC
El estuche de carga no funciona	Limpie el puerto de carga	Asegurese de que el estuche de carga está cargado	
	**Asegurese de que el audifono otc está puesto correctamente en el estuche de carga		

Este producto no es resistente al agua. Por lo tanto, el usuario debe tener cuidado para evitar que entre agua en el producto. Quítese los audífonos OTC antes de ducharse o de cualquier actividad relacionada con el agua para evitar daños permanentes a los OTC - ACTIVE

No utilice laca para el cabello ni secador de pelo cuando utilice sus audífonos OTC.

Cuando no esté en uso durante un período prolongado, coloque el producto en el estuche de carga y cárguelo una vez cada 1 o 2 meses para evitar daños a la batería.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE LA FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con las normas generales de RF, requisito de exposición.

El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones. -Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC.