

# **OTC - EASY**

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**




A large, stylized, light blue graphic of a human ear is centered on the page. The ear is composed of several concentric, curved lines that form the outer ear (pinna) and the ear canal. The lines are smooth and flowing, giving it a modern, abstract appearance. The entire graphic is set against a solid, medium blue background.

[www.audiotc.com](http://www.audiotc.com)

<b>ÍNDICE</b>	Diagrama OTC - EASY.....	1
	Cómo se utilizan.....	2
	Encendido y apagado.....	3
	Ajuste de volumen.....	4
	Selección de modos.....	5
	Cómo se carga el amplificador OTC - EASY.....	6
	Parámetros técnicos.....	7
	Solución de problemas.....	8

## DIAGRÁMA OTC - EASY

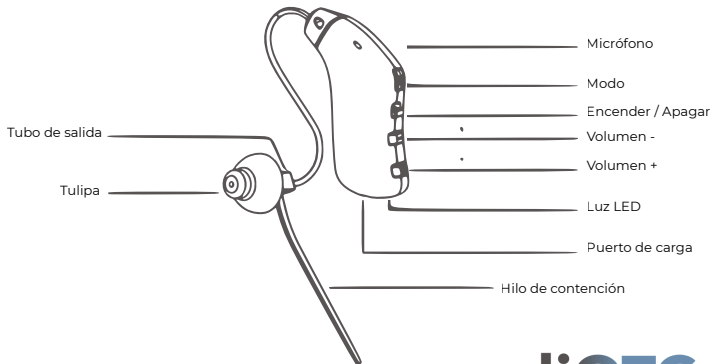

**audiOTC**

## CÓMO SE UTILIZAN

1



Inserte la tulipa en el tubo de salida

2




Introduzca la tulipa del OTC - EASY en su oído y colóquela firmemente en el canal auditivo

## ENCENDIDO / APAGADO


### ENCENDIDO

Para encender el amplificador OTC - EASY, pulse hacia abajo la pestaña del boton "ON"

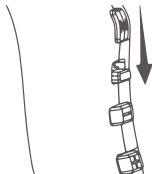


### APAGADO

Para apagar el amplificador OTC - EASY, pulse hacia arriba la pestaña del botón "ON"

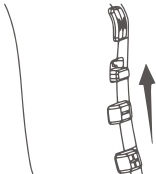


## AJUSTE DE VOLUMEN

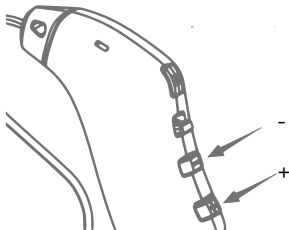

Utilice los botones "+" y "-" para aumentar o disminuir el volumen

*La sobreamplificación del sonido durante un largo periodo de tiempo puede dañar su audición. No sobrepase el volumen de un volumen cómodo para usted. Cuando apague el dispositivo, todos los ajustes anteriores se borrarán y restablecerá el volumen a la configuración predeterminada.*

## SELECCIÓN DE MODOS

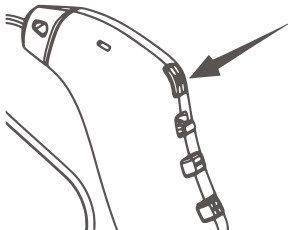

El amplificador OTC - EASY dispone de cuatro modos de escucha, cada uno de ellos adecuado para distintas situaciones. Utilice el botón de presión para seleccionar el que más se ajuste a sus necesidades en cada momento.

**Modo entorno tranquilo :** Escuchará un pitido cuando presione el botón de modo.

**Modo reducción de ruido :** Escuchará dos pitidos cuando presione el botón de modo.

**Modo interiores :** Escuchará tres pitidos cuando presione el botón de modo.


**Modo exteriores :** Escuchará cuatro pitidos cuando presione el botón de modo.



## CÓMO SE CARGA EL AMPLIFICADOR OTC - EASY



Cuando no escuche ningún sonido o se esté desvaneciendo, cargue el dispositivo

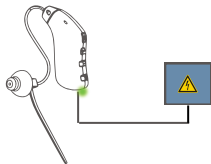

Apague el dispositivo. Conecte el cable USB a su OTC - EASY y a la toma de corriente. La luz LED de color verde se encienderá al cargar.

*Cargue durante al menos 6 horas al menos los dos primeros ciclos.  
La duración de la batería completamente cargada es de aproximadamente 40 horas*

## PARÁMETROS TÉCNICOS

Rango de frecuencia	Ruido de entrada	Voltaje	Corriente
300 Hz-5000 Hz	< 22 dB	D.C.3.7V	<2 mA
Salida de sonido máxima	Ganancia de sonido	Distorsión de onda armónica	Cargador
118 + 4 dB	36+- 5 dB	<3%	DC 5V/50mA -1A
			Batería
			40 mAh (Litio)

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

<b>El sonido está distorsionado</b>	Baje el volumen	Cargue el audífono OTC	Limpie la tulipa
<b>El sonido es débil</b>	Cargue el audífono OTC	Suba el volumen	Compruebe si la tulipa esta obstruida
<b>Suena un pitido constante</b>	Inserte las tulipas hasta que encajen	Baje el volumen	Limpie las tulipas
<b>El amplificador OTC no funciona</b>	Limpie el tubo de salida	Remplace por otra tulipa	Cargue el amplificador OTC

Este producto no es resistente al agua. Por lo tanto, el usuario debe tener cuidado para evitar que entre agua en el producto. Quítese los audífonos OTC antes de ducharse o de cualquier actividad relacionada con el agua para evitar daños permanentes a los OTC - ACTIVE

No utilice laca para el cabello ni secador de pelo cuando utilice sus audífonos OTC. Cuando no esté en uso durante un período prolongado, coloque el producto en el estuche de carga y cárguelo una vez cada 1 o 2 meses para evitar daños a la batería.